



## UNI-LAYER

Универсальная микродисперсная металлокерамика в один слой



# Простой путь к эстетике высокого качества


VINTAGE MP Uni-Layer это современная керамика в один слой, используя которую вы сможете быстрее и эффективнее добиваться высоких эстетических результатов.

Сбалансированное сочетание рассеивания света и насыщенности цвета определяет комбинацию оптических свойств дентина и эмали всего в одной массе.

Возможно моделирование по выбору с высокой или низкой транслюцентностью.

По своему составу новые керамики Uni-Layer базируются на VINTAGE MP, известной металлокерамике на основе полевого шпата. Результат – монолитная структура, обладающая стабильной прочностью, и, вместе с тем, обеспечивающая щадящий режим для антагонистов.

VINTAGE MP Uni-Layer позволяет выполнять интересную с экономической точки зрения технику облицовки с высокими требованиями к эстетике.

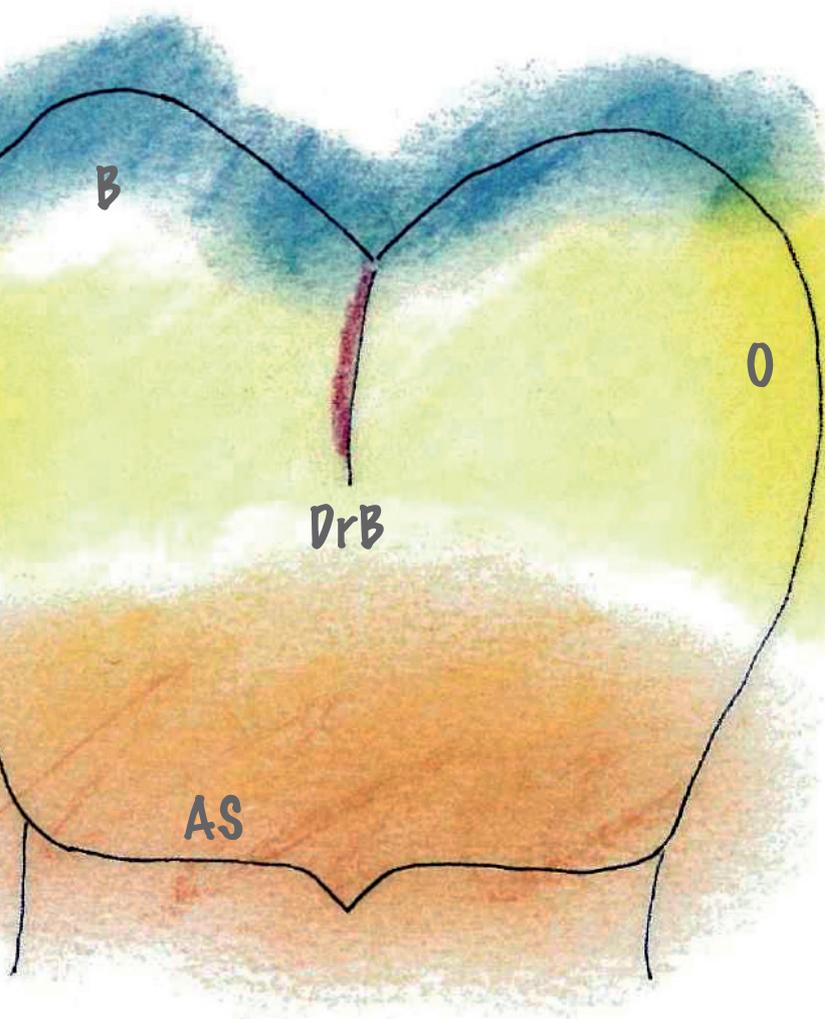

## Квинтэссенция существенного

- Стабильно высокое качество при изготовлении
- Быстрая и не сложная техника нанесения одного слоя
- Концентрация преимущественно на форме и функции
- Возможность простой коррекции
- Все 20 цветов цветовой системы V могут воспроизводиться всего двумя массами
- Простое воспроизведение цвета с помощью красок для керамики VINTAGE Art
- В зависимости от требований и ситуации возможна комбинация с транслюцентными массами и массами с опаловым эффектом системы VINTAGE MP
- Экономия времени на реставрацию до 50%

# Для начинающих и профессионалов

Система VINTAGE MP Uni-Layer подкупает за счет благоприятных рабочих свойств и малой вероятности ошибки.


При применении светодинамических масс Uni-Layer только за один рабочий этап моделируется и затем обжигается полная анатомическая форма реставрации бокового или фронтального зуба. Эта техника позволяет уделять больше внимания форме и функции при облицовке и избегать неправильного расположения отдельных слоев керамики.



1  
Опак-паста



2  
Моделирование Uni-Layer

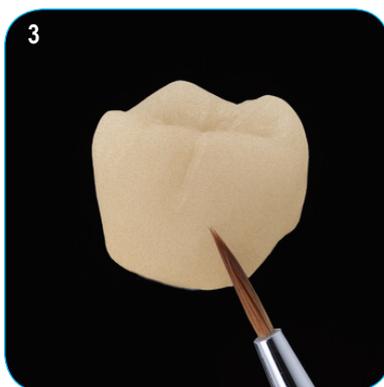

3  
Нанесение красок



4  
Окончательная обработка

## Естественный вид с эффектом глубины

Керамические массы VINTAGE MP Uni-Layer за счет своего сочетания с цветовыми опак-пастами создают гармоничный цвет и иллюзию пространственной глубины. Воспроизведение естественных цветов для каждого желаемого цвета зуба достигается без больших затрат времени при использовании красок для керамики с высокой флуоресцентностью VINTAGE Art путем техники внутреннего или внешнего нанесения красок.



# VINTAGE MP Uni-Layer предлагает больше



*"VINTAGE MP Uni-Layer дает нам, техникам, большие возможности действительно быстро работать и при этом добиваться удивительно хороших результатов очень простым способом.*

*В комбинации с красками VINTAGE Art керамика Uni-Layer является отличным решением*

*для большинства клинических случаев. Хотя система в первую очередь была разработана для реставрации боковых зубов, я очень позитивно оцениваю хорошие эстетические результаты при стандартных реставрациях фронтальных зубов. Взгляд на современное развитие рынка позволяет сделать вывод о том, что фактор времени приобретает все большее значение в нашей повседневной работе. Как показывают мои личные наблюдения, керамика Uni-Layer поможет сэкономить до 30 минут при изготовлении одного облицованного элемента. Таким образом, у нас всех появилась альтернатива полным анатомическим системам CAD/CAM и мы можем полностью изготовить реставрацию в нашей собственной лаборатории!"*

*(Tomasz Dabrowski)*

Керамические массы Uni-Layer позволяют получить впечатляющие результаты естественности и в реставрациях фронтальных зубов. В зависимости от целей и ситуации выбор модификаторов с опаловым эффектом и трансlucentных модификаторов системы керамики VINTAGE MP обеспечивает практически неограниченные возможности в придании индивидуальных характеристик.



**Мостовидный протез для 11-13**

Uni-Layer с индивидуальными характеристиками с применением трансlucentных масс с опаловым эффектом VINTAGE MP

**Мостовидный протез для 21-23**

Uni-Layer с нанесенными красками для керамики VINTAGE Art

## Компоненты системы



VINTAGE MP Uni-Layer, набор (A2/A3)

Кат. номер 9633

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 50 гр

Кат. номер 9627

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 200 гр

Кат. номер 9628

VINTAGE MP Uni-Layer LT, 50 гр

Кат. номер 9630



**SHOFU INC.** 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan ([www.shofu.co.jp](http://www.shofu.co.jp))  
**SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD.** 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 ([www.shofu.com.sg](http://www.shofu.com.sg))  
**SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.** No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China ([www.shofu.com.cn](http://www.shofu.com.cn))  
**SHOFU DENTAL CORPORATION** 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA ([www.shofu.com](http://www.shofu.com))  
**SHOFU UK** Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK ([www.shofu.co.uk](http://www.shofu.co.uk))  
**SHOFU DENTAL GmbH** [EC REP] Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany ([www.shofu.de](http://www.shofu.de))  
SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.