

Veracia SA ANTERIOR & POSTERIOR

Q³ : Quick Quality Quartet
PACK TIME SAVING!

Отличная эстетика
Значительная экономия времени



Идея становится реальностью

Соответствующие возрасту, функциональные протезы с высоким комфортом при ношении

При разработке полуанатомических передних и боковых зубов Veracia SA впервые учитывался износ сохранившихся естественных зубов.

Они были созданы по образцу полноанатомической линии зубов Veracia.

При этом были сохранены функциональные характеристики зубов Veracia и созданы участки абразии в точно заданных секторах.

Результатом являются заметно улучшенная эффективность жевания, приятный комфорт при ношении стабилизированного протеза и значительно меньший стресс для височно-нижнечелюстного сустава.



Внесистемная установка зубов для любой существующей концепции окклюзии

В случае с Veracia SA Вы не привязаны к какой-либо конкретной концепции окклюзии. Благодаря четкой структуре окклюзии, эффективной центральной окклюзии, а также специально созданным областям абразии боковые зубы можно легко и точно установить по обеим сторонам.

- Сбалансированная окклюзия
- Лингвализированная окклюзия
- Окклюзия зуб к зубу
- Окклюзия зуб к двум зубам



Сторона баланса




Рабочая сторона

Уникальный дизайн жевательных поверхностей с физиологическими свободными пространствами


Окклюзионные области боковых зубов Veracia SA специально расширены за счет вогнутых свободных пространств в функциональном направлении движения нижней челюсти. Центрические упоры полноанатомических боковых зубов были оставлены без изменений, рядом были добавлены соответствующие свободные пространства.

Эта особенность является идеальной исходной ситуацией для сбалансированной или лингвализированной окклюзии, поэтому после установки практически не требуется делать коррекции с помощью шлифовки.

Кроме того, эти свободные пространства облегчают пациентам попадание в статическую окклюзию, а латеральные силы сдвига уменьшаются до минимума

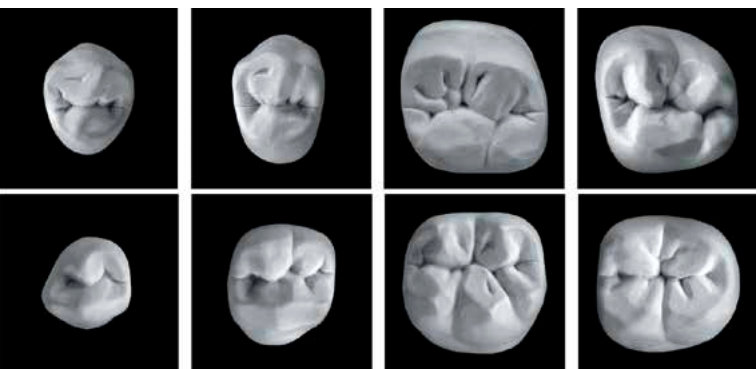


Глубокие окклюзионные фиссуры в сочетании со шлифованными фасетками, с особенностями, обусловленными выполнением специфических движений, обеспечивают четкое и простое размещение зубов при установке, а также более высокую жевательную эффективность изготовленного протеза.

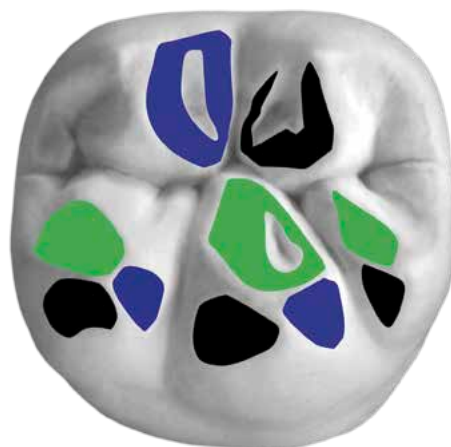

- Латеротрузия
- Медиотрузия
- Протрузия

Зубы, которые находят друг друга

Veracia SA способствует повышению Вашей эффективности при ежедневном выполнении ортопедических работ. Благодаря уникальному "функциональному дизайну" установка боковых зубов происходит практически сама по себе.

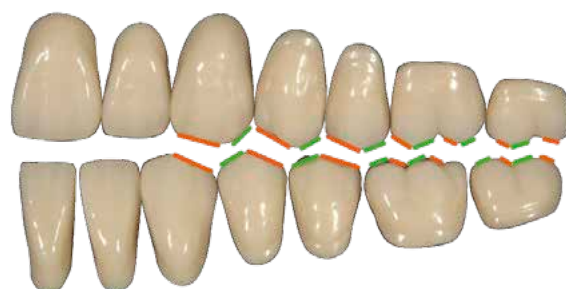

Раз, два, **Q3 Pack** ... ГОТОВО!

Великолепная эстетика и функция с существенной экономией времени

Физиологический дизайн боковых зубов Veracia SA позволил разработать уникальный, не содержащий воска держатель гарнитура со встроенным вспомогательным приспособлением – Q3 Pack. Таким образом, у Вас впервые появилась возможность легкой установки боковых зубов - всегда с превосходной функцией и надежностью для пользователя, независимо от используемой системы артикулятора



Q3 Pack сокращает время установки восьми боковых зубов Veracia SA до нескольких минут. Трудоемкие приготовления или сложное оборудование не требуются.

Q3 Pack точно и надежно обеспечивает правильное контактное соотношение боковых зубов Veracia SA. Коррекция функции и при шлифовке сведены до минимума.

Q3 Pack содержит отдельные боковые зубы, положение которых можно отрегулировать индивидуально.



Всего 3 шага к функциональной установке зубов



1
Установка передних зубов и подготовка восковых валиков осуществляется обычным образом. Поместите паз на мезиальной стороне **Q3 Pack** на клык и в дистальной области выровняйте к альвеолярной линии.



2
Проверьте правильность положения ручек в горизонтальном направлении к жевательной плоскости и зафиксируйте зубы воском.



3
Легкое нажатие на ручку высвобождает постановку.





Готово
Межзубные пространства закрыть небольшим количеством воска ... готово



Лучшие физические свойства благодаря технологии композитов MF-H

Зубы Veracia SA, как и хорошо зарекомендовавшие себя полно анатомические зубы линии зубов Veracia, состоят из гибридного композитного материала с микронаполнителями (MF-H Micro Filled Hybrid Composite), армированного стеклом с покрытием. Эта однородная структура обеспечивает лучшие физические свойства и превосходную стабильность.

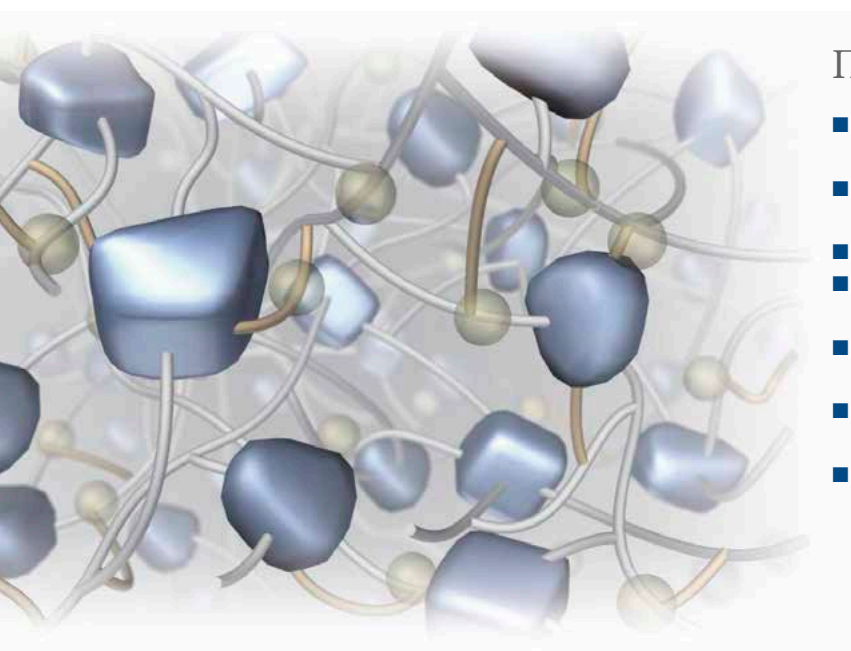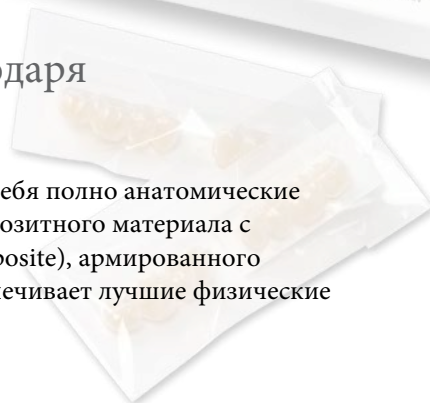

Почему Veracia SA

- Формы зубов, соответствующие возрасту и функции
- Нет привязки к концепции окклюзии
- Экономия времени при установке
- Сбалансированная окклюзия, только с помощью постановки зубов
- Высокая надежность для пользователя
- Эффективное производство в зуботехнической лаборатории
- Стабильное качество изготовленных протезов

ПРОСТО

Не требуется сложного оборудования

ЭФФЕКТИВНО

Зубной гарнитур без воска = помощь при установке зубов

БЫСТРО

Отсутствие трудоемких приготовлений

ТОЧНО

Всегда корректные соотношения контактов

СВОБОДНО

Можно использовать с артикулятором любой системы

Благодаря новому способу установки зубов с помощью **Q3 Pack** Вы сразу же экономите драгоценное время



Veracia SA Anterior

Современные компьютеризированные производственные процессы обеспечивают всегда одинаковую симметрию левых и правых передних и боковых зубов, а также точные размеры.



Квадратная форма

S4	43.0 9.2 7.9	
S5	45.7 9.8 8.4	
S6	48.5 10.4 8.9	
S7	51.2 11.0 9.4	



Прямоугольная форма

ST4	43.5 9.6 8.0	
ST5	46.3 10.2 8.5	
ST6	49.0 10.8 9.0	
ST7	51.8 11.4 9.5	




Овал

O4	43.4 10.4 8.0	
O5	46.2 11.0 8.5	
O6	49.0 11.7 9.0	
O7	51.8 12.4 9.5	



Фронтальные нижние

MA4	32.5 9.4 4.7	
MA5	34.6 10.1 5.0	
MA6	36.7 10.7 5.3	
MA7	38.8 11.3 5.6	
MA8	40.9 11.9 5.9	

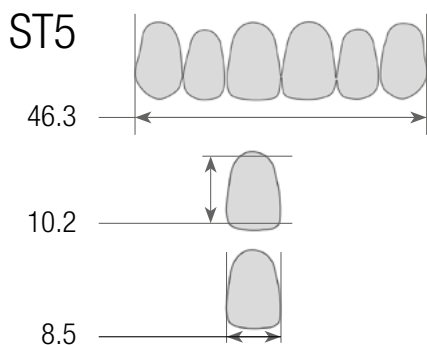


Передние и боковые зубы доступны классических цветов VITA* A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 и цвета SHOFU Whitening W1. Q3 Pack предлагается цвета A2, A3 и A3.5, A2, A3, A3.5, B2, C2 и D2.

Veracia SA Posterior & Q³ Pack

Жевательные зубы Veracia SA предлагаются по выбору в виде гарнитура на подставке для зубов или же Q³ Pack без воска.



S28	28.0			Veracia SA Posterior and Q ³ Pack
	8.7			
S30	30.0			Veracia SA Posterior and Q ³ Pack
	9.4			
S32	32.0			Veracia SA Posterior and Q ³ Pack
	10.0			
S34	34.0			Veracia SA Posterior and Q ³ Pack
	10.6			
S36	36.0			Veracia SA Posterior
	11.2			
	38.0			
	11.3			

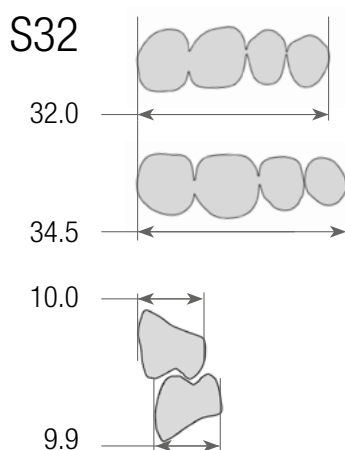

Все данные в миллиметрах

Рекомендации для верхних / нижних передних зубов

Глубокий прикус по вертикали	1 mm		Верхний	S4	S5	S6	S7
			ST4	ST5	ST6	ST7	
Глубокий прикус по горизонтали	3-4 mm		Верхний	O4	O5	O6	O7
			Нижний	MA4	MA5	MA6	MA7
Глубокий прикус по вертикали	1 mm		Нижний	S4	S5	S6	S7
			ST4	ST5	ST6	ST7	
Глубокий прикус по горизонтали	0-1 mm		Нижний	O4	O5	O6	O7
			Нижний	MA5	MA6	MA7	MA8

Компоненты системы



Veracia SA - Posterior
1 форма зубов ВЧ / НЧ размеров
S28, S30, S32, S34



Veracia SA - Posterior Q3 Pack
1 форма зубов ВЧ / НЧ размеров
S28, S30, S32, S34



Veracia SA - Anterior
3 формы зубов ВЧ размеров Größen 4, 5, 6

- S (квадратная)
- ST (прямоугольная)
- O (овал)

1 форма зубов НЧ размеров 4, 5, 6 и 7

- МА (с большей абразией)



Veracia SA - 28 Teeth Set A2 / A3
1 гарнитур передних зубов ВЧ (ST6)
1 гарнитур передних зубов НЧ (МА6)
По 1 гарнитуру боковых зубов Q3 Pack
(ВЧ / НЧ размер 32)
Номер A2ST66 / A3ST66



Veracia SA - AP Full Set
13 гарнитуров передних зубов (9 ВЧ /
4 НЧ)
6 гарнитуров боковых зубов (S30, S32,
S34:
3 ВЧ / 3 НЧ)
Номер FSA3



Алкор Дент

125310, Россия, Москва,
Пятницкое шоссе, дом 36 корп. 1
Тел. +7 499 550 34 00
+7 905701 66 62
www.alkordent.ru
korchagin-dental@mail.ru