

Сильный дуэт для надежного соединения



CRB – Cerarezin Bond

Система **Cerarezin Bond** позволяет надежно и на долгий срок склеивать широкий спектр стоматологических материалов как внутри, так и вне ротовой полости.


Cerarezin Bond можно использовать, например, для быстрого и эффективного ремонта или завершения керамических реставраций с использованием светоотверждаемых материалов. Кроме того, **CRB** надежно связывает светоотверждаемые облицовочные композиты с самоотверждающимися смолами или друг с другом. И нет никаких ограничений для индивидуализации зубных протезов с помощью светоотверждаемых облицовочных материалов.

Создаваемые связи чрезвычайно устойчивы к влаге и термическому воздействию.



Прочные склеивание без компромиссов

Ceraresin Bond отлично и надежно связывает свето- и самоотверждающиеся композиты со всеми керамическими облицовочными материалами. Поскольку **Ceraresin Bond** очень прост в использовании как внутри, так и вне ротовой полости, он практически безграничен в стоматологической практике и лабораториях. Даже в долгосрочной перспективе прочные связи, созданные с помощью **Ceraresin Bond**, остаются прочными без компромиссов.

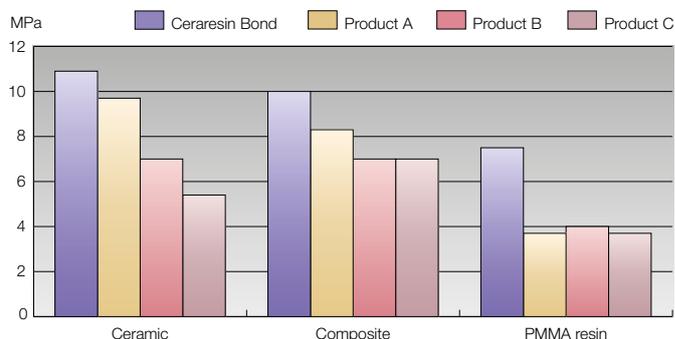


Прочность сцепления композитов с различными материалами с **Cera Resin Bond** по сравнению с системами связывания керамика / смола других производителей


Легкое и быстрое нанесение



Нанести CRB 1 / оставить на 10 сек.

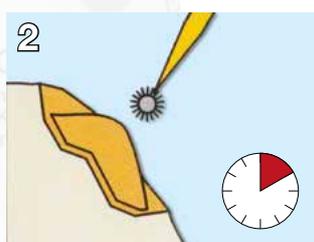

Нанести CRB 2 / оставить на 10 сек.

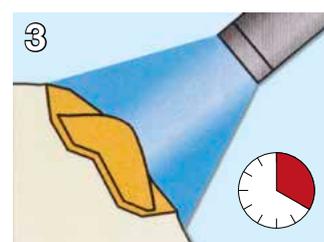

Светоотверждение в течение 20 секунд / готовность к нанесению композитного материала

Versatile system

- Внутри- и внеротовое использование
- Ремонт и завершение керамических коронок и мостовидных протезов облицовочными композитами
- Завершение керамических и полимерных зубов композитом
- Надежное соединение самоотверждаемых смол и светоотверждаемых облицовочных композитов
- Повышение прочности сцепления между сильно шитыми акриловыми зубами и самоотверждающимися полимерами для протезов
- Совместимость с универсальным праймером SHOFU для реставраций на металлической основе



CRB набор, PN 1741

