

# Universal Opaque

Светоотверждаемые пасты для керамики и солидекса




# Две композитные системы - концепция одного опакера

- **Универсальная система**

Universal Opaque - это новое поколение непрозрачной пасты для систем CERAMAGE и SOLIDEX.

- **Легко и быстро наносится**

Улучшенные тиксотропные свойства значительно повысили мягкость и текучесть паст. Теперь их чрезвычайно легко и быстро наносить.

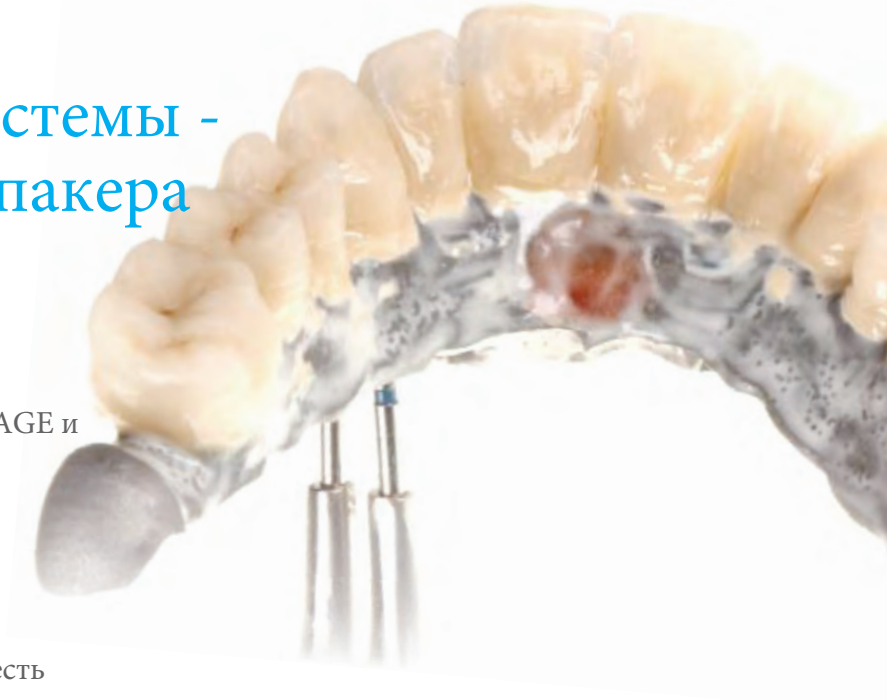


*Восстановление имплантатов и фотографии Uwe Gehringer & Clemens Bieber, Munich, Germany*

- **Отличные маскирующие свойства и долговечность**

Специально оптимизированные микронаполнители обеспечивают чрезвычайно тонкое распределение частиц, сочетая превосходные маскирующие свойства с одинаково выдающейся и долговечной связью с зубными сплавами.

- **Удивительно просто**

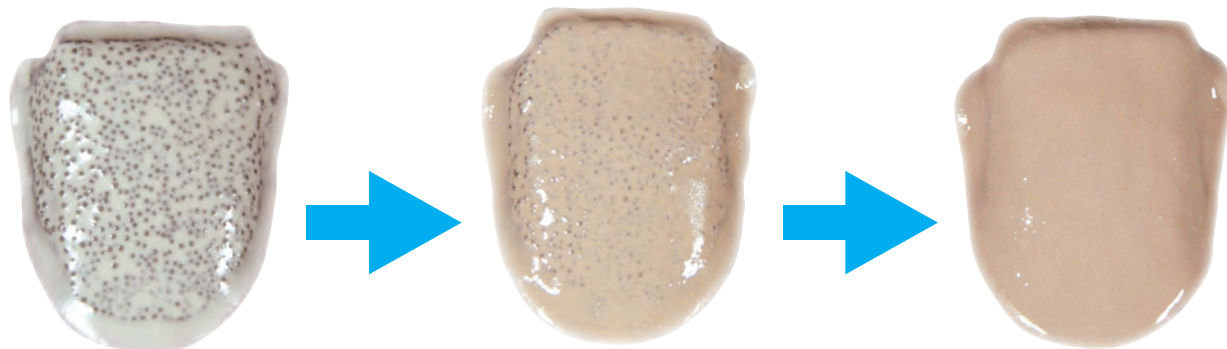

## Pre-Opaque

Universal Pre-Opaque, первый нанесенный слой, течет во все области крепления каркаса и включается в систему склеивания. Особые полимеризационные характеристики этой пасты обеспечивают ее полное отверждение даже в подрезах.

## 1й Опаковый слой

Следующий маскирующий слой Universal Opaque может быть легко и равномерно нанесен благодаря их мягкой консистенции. Первый тонкий непрозрачный слой уже создает хороший маскирующий эффект и однородный базовый оттенок.

## 2й Опаковый слой


После нанесения второго слоя каркас равномерно маскируется в нужный оттенок.

# Правильный оттенок, с самого начала

## Whitening-Shades



## V-Shades

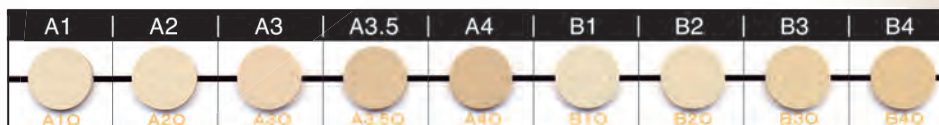

## NCC-Shades



## Effect-Shades




# Надежная связь с любым стоматологическим СПЛАВОМ

*Universal Opaque образует симбиотическую сеть со связующим агентом M.L. Primer, обеспечивающую прочную и надежную связь.*


*Особенно при использовании драгоценных сплавов эта сеть чрезвычайно устойчива к гидролизу и термическим нагрузкам.*

*Источник: кафедра зубного протезирования*

Прочность на сжатие при сдвиговом сцеплении с полудрагоценным сплавом (AuroLloyd KF) после 24 ч хранения в дистиллированной воде при 37 °

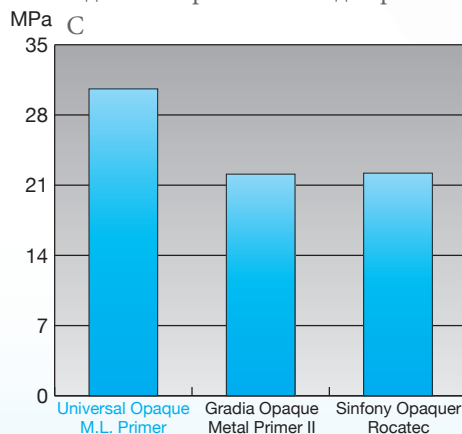

Прочность на сжатие при сдвиге к полудрагоценному сплаву (AuroLloyd KF) после 25 000 термоциклов

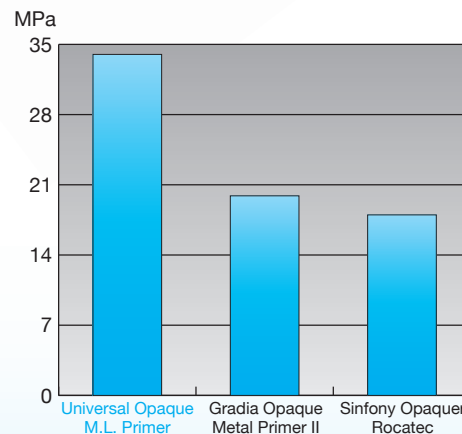



# Системные компоненты



## Universal Pre-Opaque

Universal Pre-Opaque очень текуч и надежно сцепляется со стоматологическими сплавами и пастами Universal Opaque.



## Universal Opaque

Универсальные опакующие пасты легко наносятся и одинаково подходят для систем CERAMAGE и SOLIDEX.



## SOLIDEX 8-Color-Set

Стартовый набор SOLIDEX, включающий цвета Vita от A1 до A4, B2, B3 и C3



## CERAMAGE 8-Color-Set

Все компоненты для изготовления эстетических реставраций V-оттенков от A1 до A4, B2 и B3, а также C3 в практической стойке



## M.L. Primer

Для надежного приклеивания ко всем стоматологическим сплавам



## CRB - Ceraresin Bond

Проверенная система для соединения со светоотверждаемыми и самоотверждающимися смолами и всеми керамическими облицовочными материалами



Алкор Дент