

ZiLMaster


Ключ к полировке современной керамики



ZiLMaster

ZiLMaster - это трехступенчатый полировщик с алмазным наполнителем, согласованный по цвету, специально разработанный с равномерным распределением алмазных частиц в эластичном силиконовом связующем для обеспечения максимально гладкой поверхности и зеркального блеска на современных цельно керамических реставрациях, таких как цирконий и дисиликат лития.

ZiLMaster выпускается различных формах, с 3мя видами зернистости и с разными видами хвостовиков и предназначен для интра- и экстраоральных манипуляций.

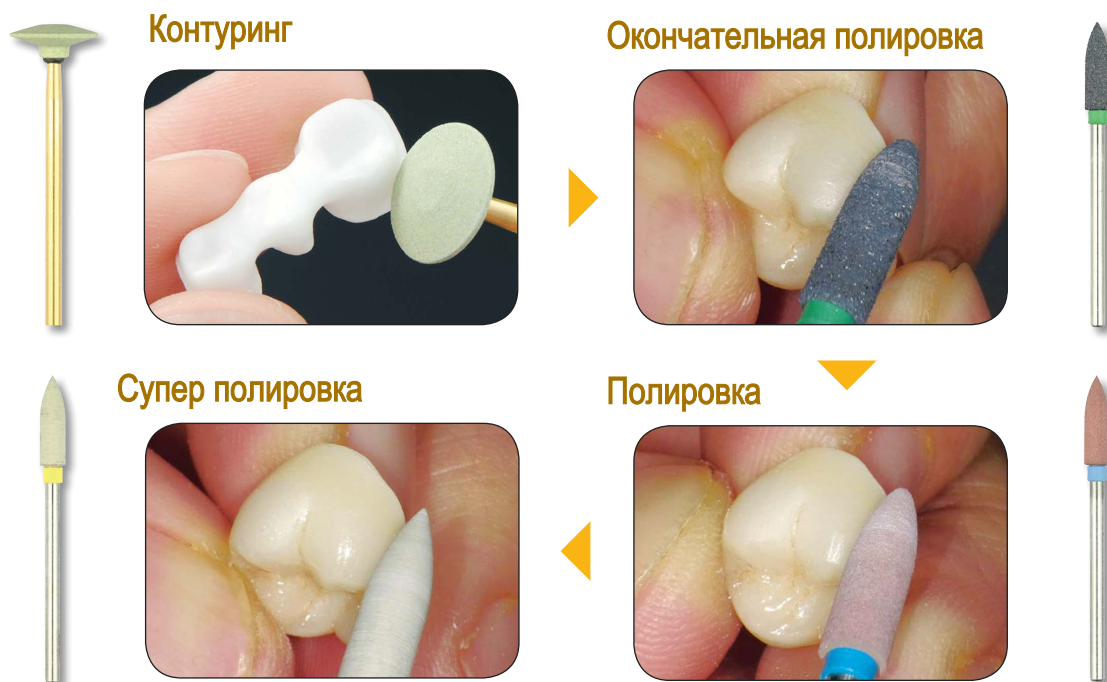


Контуринг с Dura-Green DIA




Контурингование оксидной керамики, такой как диоксид циркония, включает формирование, а также удаление более крупных поверхностных царапин. Dura-Green DIA - это специально разработанный абразивный материал, пропитанный керамическим алмазом, который обеспечивает более гладкую поверхность практически без сколов и меньшего тепловыделения.

Изображение поверхности (x 400) после контурной обработки с помощью Dura-Green DIA и Diamond Point Fine

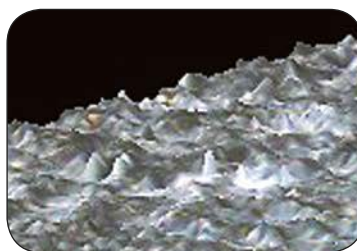


Обработано Dura-Green DIA

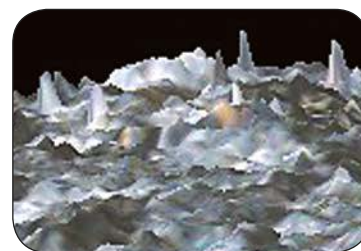

Обработка алмазным покрытием Diamond Point Fine

Прогнозируемые шаги к стойкому блеску


Материал	Экстраоральный / Интраоральный	Recommended procedure from contouring to polishing			
		Контурирование	Финирование	Полировка	Супер полировка
Zirconia	Экстраоральный / Интраоральный	Dura-Green DIA	ZiLMaster Coarse	ZiLMaster Средняя	ZiLMaster Fine
Lithium Disilicate (or other ceramics)	Экстраоральный / Интраоральный		* Только в деликатных областях, таких как поля или края вкладок / накладок / винир.	ZiLMaster Средняя	

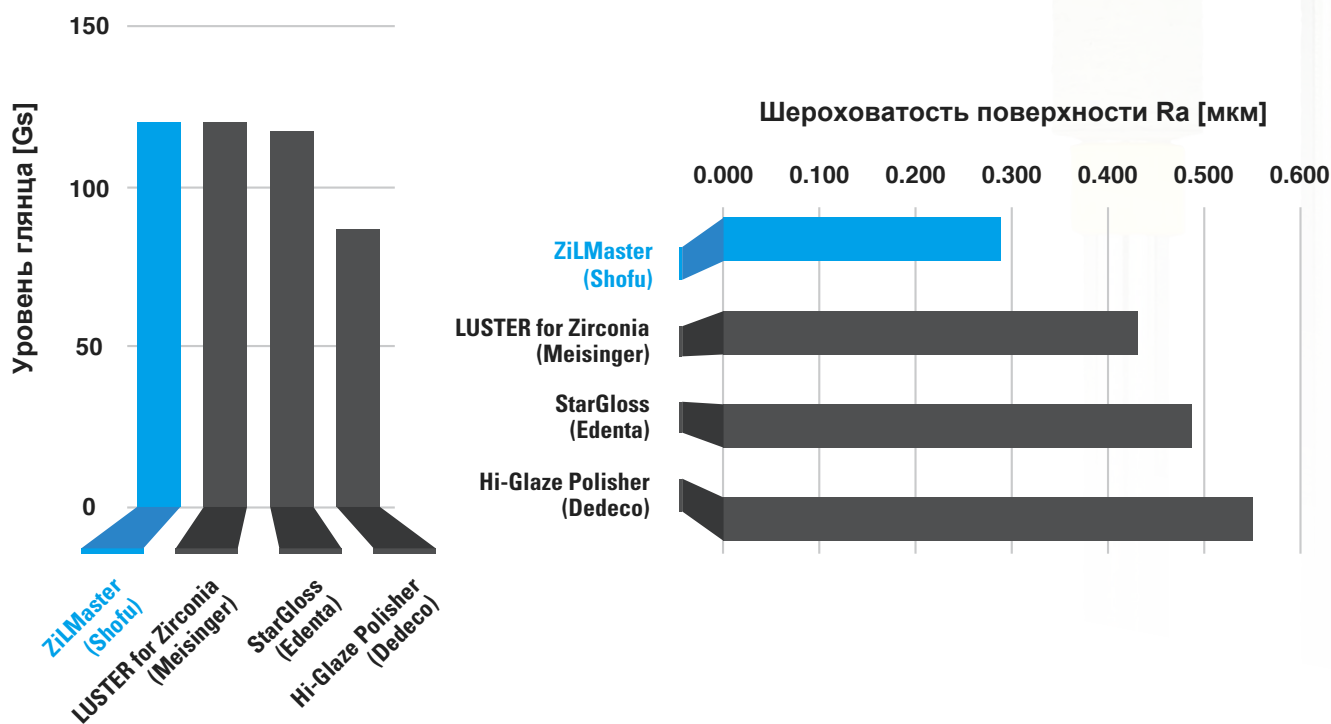

Zil Master Финироване & Комплект для полировки HP

Комплексная и эластичная система отделки и полировки с алмазной пропиткой для использования в лаборатории / в кабинете врача, содержащая набор полиров Dura-Green DIA и ZiLMaster с цветовой кодировкой с 3 различными зёрнами, которые обеспечивают высочайший естественный блеск для всех типов современной керамики, включая диоксид циркония и реставрации из дисиликата лития.



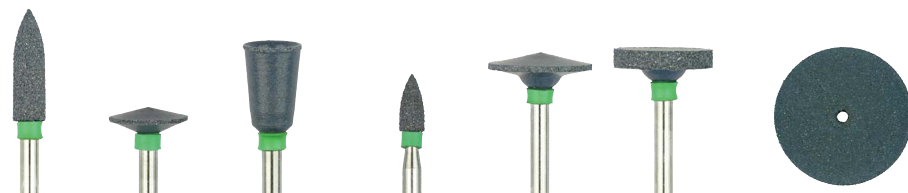

	Shape	Bullet	Knife	Cup	Minipoint	KN7	WH6	Unmounted Wheel
	ISO NO.	040	090	065	030	125	120	170
ZiLMaster Coarse	HP 3 pcs	0640			0641	0642	0643	
	HP 1 pcs							0645
	CA 3 pcs	0658	0662	0663	0661			
ZiLMaster Medium	HP 3 pcs	0646			0647	0648	0649	
	HP 1 pcs							0651
	CA 3 pcs	0665	0659	0668	0666			
ZiLMaster Fine	HP 3 pcs	0652			0653	0654	0655	
	HP 1 pcs							0657
	CA 3 pcs	0670	0672	0673	0671			

Рекомендуемый диапазон скоростей (установленный полировщик): 10 000 - 15 000 об / мин / макс. 20000 об / мин, контактное давление: 1,5 Н

Рекомендуемый диапазон скорости (несобранное колесо): 5000 - 10 000 об / мин / Макс. 15000 об / мин, контактное давление: 1,5 Н

Информация для заказа



ZILMASTER FINISHING & POLISHING KIT HP [PN S0009]	
ТИП	ФОРМА
Dura-Green DIA	TC4
	KN7
	WH6
ZiLMaster Course	Bullet
	KN7
	WH6
ZiLMaster Medium	Пуля
	KN7
	WH6
ZiLMaster Fine	Пуля
	KN7
	WH6
ZiLMaster Refills 1 от 3 шт/ коробка	HP и CA Хвостовик

ZILMASTER ACCOPTI	
ТВЕРДОСТЬ/ХВОСТОВИК	PN
Coarse CA Bullet, Knife, Cup & Minipoint	0664
Medium CA Bullet, Knife, Cup & Minipoint	0669
Fine CA Bullet, Knife, Cup & Minipoint	0674
Coarse HP Bullet, KN7, WH6 & Minipoint	0644
Medium HP Bullet, KN7, WH6 & Minipoint	0650
Fine HP Bullet, KN7, WH6 & Minipoint	0656

DURA-GREEN DIA		
ТВЕРДОСТЬ/ХВОСТОВИК	PN	
HP	CY5	0156
	FL3	0158
	IC5	0162
	KN7	0154
	RD3	0159
	TC2	0161
	TC4	0155
CA	WH6	0157
	FL3	0163
	RD3	0164
HP Assorted	TC2	0165
	CY5	0153
	KN7	
CA Assorted	TC4	0166
	FL3	
	RD3	

