

# СИЛЬНЫЙ ДЛЯ НАДЕЖНОГО СОЕДИНЕНИЯ



## CB Cera esin Bond

Система CERA Resin Bond позволяет соединять самые разные материалы друг с другом внутри ротовой полости и вне нее, надежно и на долгий срок.

Например, Вы можете быстро и рационально дополнять керамические реставрации светоотверждаемыми материалами. Кроме этого, CERA Resin Bond надежно соединяет полимеры холодной полимеризации со светоотверждаемыми облицовочными пластмассами, а также различные светоотверждаемые облицовочные пластмассы друг с другом.

Можно также без каких-либо ограничений использовать светоотверждаемые облицовочные материалы для придания индивидуальных особенностей зубам протезов.

Такие соединения чрезвычайно устойчивы к воздействию влаги и тепловым нагрузкам.




Исследования — наш лучший продукт

# Устойчивое соединение без компромиссов

Cera Resin Bond убеждает великолепным и долговечным соединением светоотверждаемых и самоотверждаемых пластмасс с любыми керамическими облицовочными материалами.


Именно благодаря простому применению в ротовой полости и вне нее CERA Resin Bond предлагает практически неограниченные возможности использования в стоматологической клинике и зуботехнической лаборатории.

Даже спустя длительное время ношения кондиционированной реставрации Cera Resin Bond обеспечивает стабильное соединение без компромиссов.

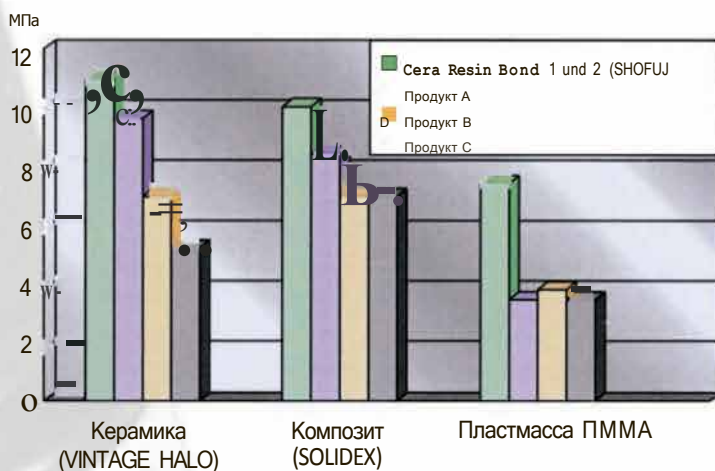


Прочность соединения между композитом и различными материалами с использованием Cera Resin Bond, а также систем для соединения пластмассы/керамики других производителей


## Простое и быстрое применение

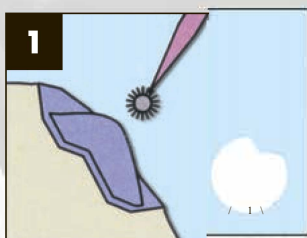

Нанести Bond 1 / оставить на 10 сек.

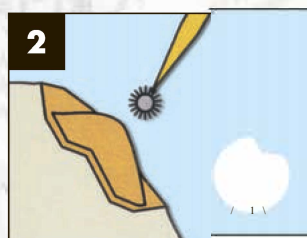

Нанести Bond 2 / оставить на 10 сек.

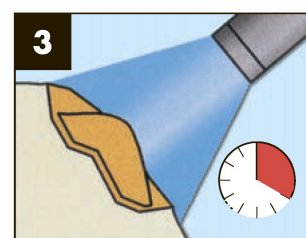

Полимеризовать 20 сек. с помощью полимеризационной лампы / Готово к нанесению композита

## Многообразие возможностей:

- Возможность применения в ротовой полости и вне ротовой полости
- Ремонт и дополнение формы керамических коронок и мостов с использованием облицовочных композитов
- Дополнение формы керамических и пластмассовых зубов композитами
- Надежное соединение самоотверждаемых пластмасс со светоотверждаемыми облицовочными композитами
- Повышение прочности соединения акриловых зубов с самоотверждающимися пластмассами для протезов
- Возможность комбинации с адгезивным раствором ML Primer



CRB Kit  
номер для заказа:  
1741

ООО "Алкор Дент"  
125310, Россия, Москва,  
Пятницкое шоссе, дом 36 корп. 1  
Тел. +7 499 550 34 00; +7 905 701 66 62; +7 499 714 70 30  
korchagin-dental@mail.ru  
www.alkordent.ru