

# OneGloss M

MOUNTED

Финиры и полиры One-step  
для КОМПОЗИТОВ



# Финирирование и полировка

Силиконовые полиры One-step с оксидом алюминия обеспечивают идеальную финишную обработку композитных реставраций – путем простой регулировки контактного давления во время рабочего процесса от обработки до полировки.

- Полиры OneGloss M смонтированы на хвостовике углового наконечника из высококачественной стали, их можно стерилизовать
- Обработка с высоким давлением прижима (около 1,0 Н)
- Полировка со слабым давлением прижима (около 0,3 Н)
- Удаление лишнего композита или цемента и полировка эмали с давлением от умеренного до слабого
- Полировка эмали после удаления брекетов и зубного камня или для устранения окрашивания лишь со слабым давлением прижима
- Рекомендуемый диапазон числа оборотов от 3.000 мин.<sup>-1</sup> до 10.000 мин.<sup>-1</sup> с периодическим включением водяного спрея; не превышать максимально допустимое число оборотов 15.000 мин.<sup>-1</sup>



# ОДНИМ ИНСТРУМЕНТОМ

## Выбор формы

Ассортимент включает четыре формы, которые оптимально соответствуют обрабатываемым поверхностям зубов.


### Чаша

для бугорков, режущего края, области окклюзии



### Конус Midi

для лабиальных, лингвальных, буккальных, окклюзионных областей

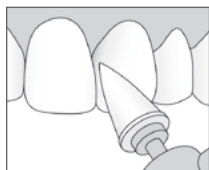


### Конус Mini

для фиссур, пришеечной области



### IC

для лабиальных, лингвальных, буккальных, межзубных областей

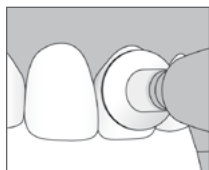

# Информация для заказа

## OneGloss M

с хвостовиком углового наконечника, 12 шт. в упаковке



Форма: конус Mini

Номер 0186



Форма: чаша

Номер 0187



Форма: конус Midi

Номер 0188



Форма: IC

Номер 0189

ООО Алкор Дент  
125310, Россия, Москва,  
Пятницкое шоссе, дом 36 корп. 1  
Тел. +7 499 550 34 00, +7 905 701 66 62  
+7 499 714 70 30  
korchagin-dental@mail.ru  
www.alkordent.ru