




UNI-LAYER

Универсальная микродисперсная металлокерамика в один слой

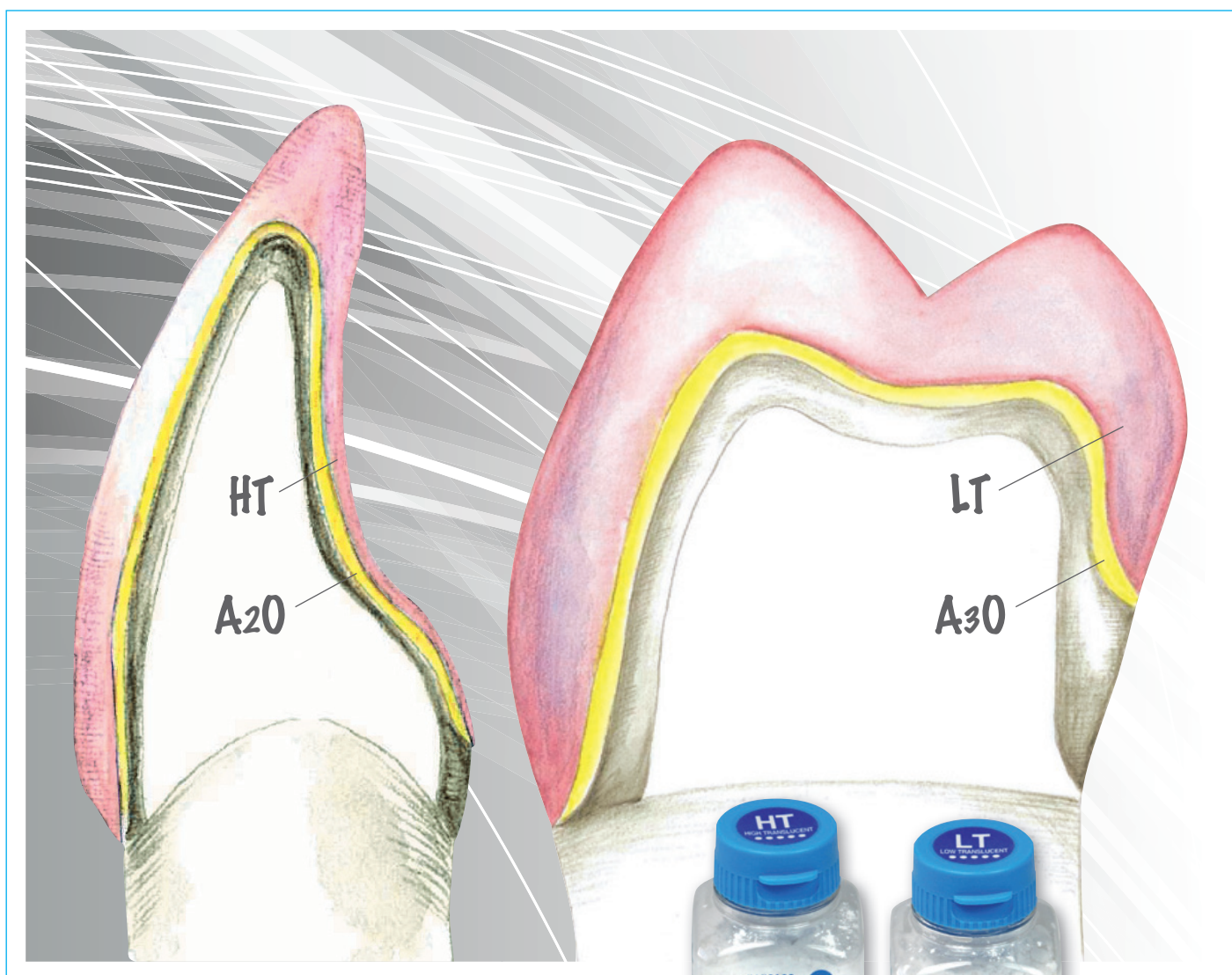

Простой путь к эстетике высокого качества



VINTAGE MP Uni-Layer это современная керамика в один слой, используя которую вы сможете быстрее и эффективнее добиваться высоких эстетических результатов.

Сбалансированное сочетание рассеивания света и насыщенности цвета определяет комбинацию оптических свойств дентина и эмали всего в одной массе.

Возможно моделирование по выбору с высокой или низкой транслюцентностью.

По своему составу новые керамики Uni-Layer базируются на VINTAGE MP, известной металлокерамике на основе полевого шпата. Результат – монолитная структура, обладающая стабильной прочностью, и, вместе с тем, обеспечивающая щадящий режим для антагонистов.

VINTAGE MP Uni-Layer позволяет выполнять интересную с экономической точки зрения технику облицовки с высокими требованиями к эстетике.

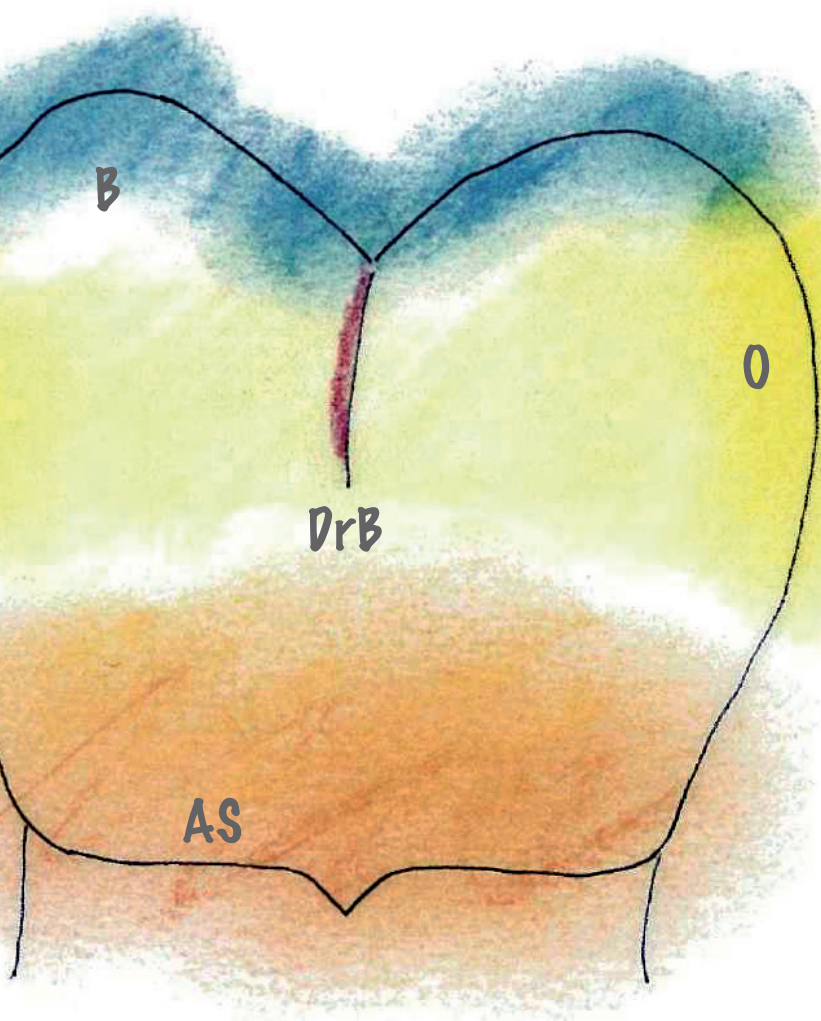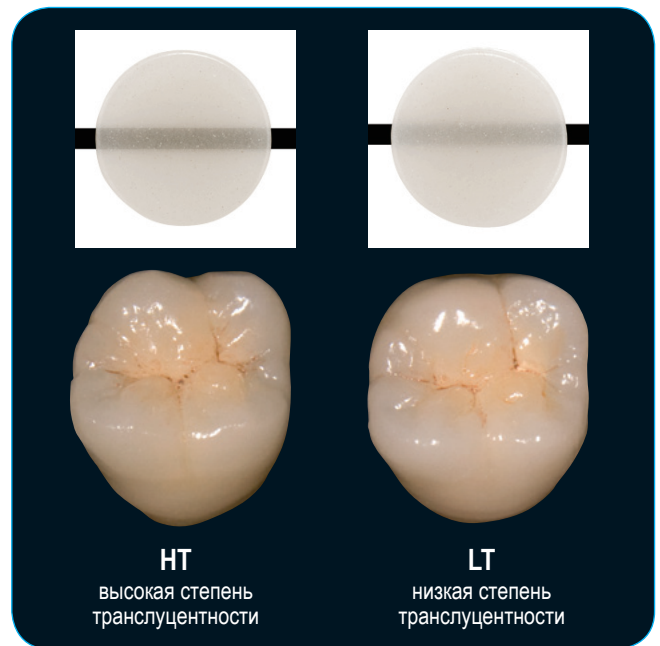


Квинтэссенция существенного

- Стабильно высокое качество при изготовлении
- Быстрая и не сложная техника нанесения одного слоя
- Концентрация преимущественно на форме и функции
- Возможность простой коррекции
- Все 20 цветов цветовой системы V могут воспроизводиться всего двумя массами
- Простое воспроизведение цвета с помощью красок для керамики VINTAGE Art
- В зависимости от требований и ситуации возможна комбинация с транслюцентными массами и массами с опаловым эффектом системы VINTAGE MP
- Экономия времени на реставрацию до 50%

Для начинающих и профессионалов

Система VINTAGE MP Uni-Layer подкупает за счет благоприятных рабочих свойств и малой вероятности ошибки.


При применении светодинамических масс Uni-Layer только за один рабочий этап моделируется и затем обжигается полная анатомическая форма реставрации бокового или фронтального зуба. Эта техника позволяет уделять больше внимания форме и функции при облицовке и избегать неправильного расположения отдельных слоев керамики.

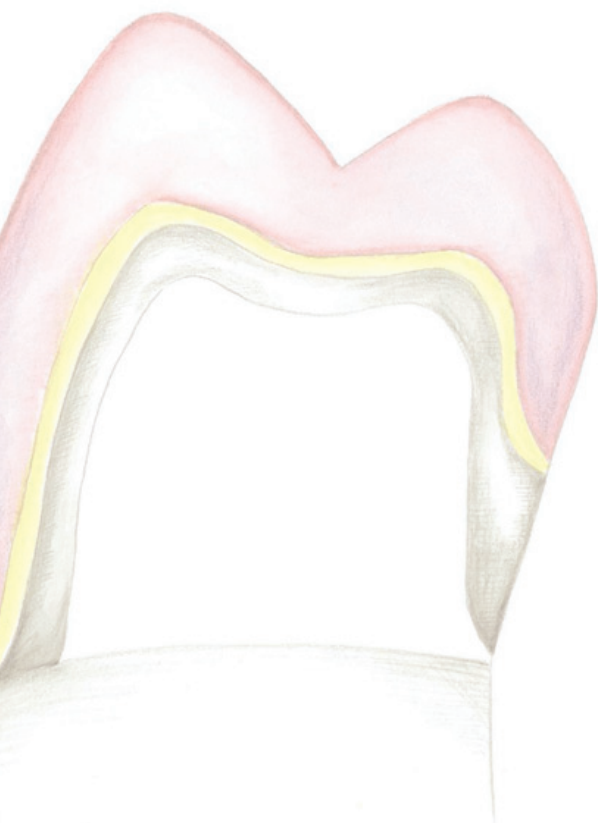

Опак-паста



Моделирование Uni-Layer

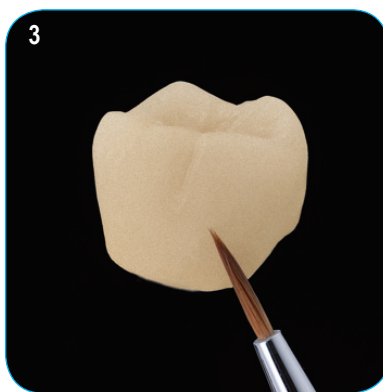

Нанесение красок




Окончательная обработка


Естественный вид с эффектом глубины

Керамические массы VINTAGE MP Uni-Layer за счет своего сочетания с цветовыми опак-пастами создают гармоничный цвет и иллюзию пространственной глубины. Воспроизведение естественных цветов для каждого желаемого цвета зуба достигается без больших затрат времени при использовании красок для керамики с высокой флуоресцентностью VINTAGE Art путем техники внутреннего или внешнего нанесения красок.


Воспроизведение цвета

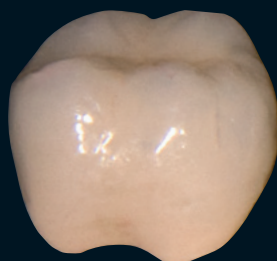


A1

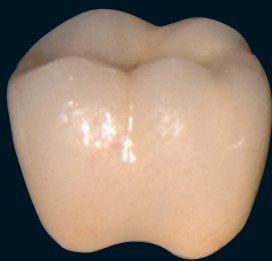

A2

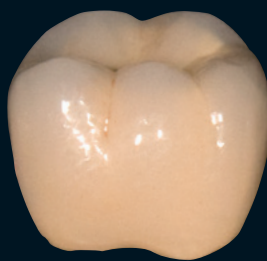

A3

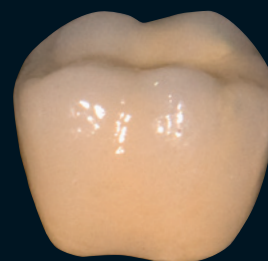

A3,5

VINTAGE MP Uni-Layer предлагает больше



"VINTAGE MP Uni-Layer дает нам, техникам, большие возможности действительно быстро работать и при этом добиваться удивительно хороших результатов очень простым способом.

В комбинации с красками VINTAGE Art керамика Uni-Layer является отличным решением

для большинства клинических случаев. Хотя система в первую очередь была разработана для реставрации боковых зубов, я очень позитивно оцениваю хорошие эстетические результаты при стандартных реставрациях фронтальных зубов. Взгляд на современное развитие рынка позволяет сделать вывод о том, что фактор времени приобретает все большее значение в нашей повседневной работе. Как показывают мои личные наблюдения, керамика Uni-Layer поможет сэкономить до 30 минут при изготовлении одного облицованного элемента. Таким образом, у нас всех появилась альтернатива полным анатомическим системам CAD/CAM и мы можем полностью изготовить реставрацию в нашей собственной лаборатории!"

(Tomasz Dabrowski)

Керамические массы Uni-Layer позволяют получить впечатляющие результаты естественности и в реставрациях фронтальных зубов. В зависимости от целей и ситуации выбор модификаторов с опаловым эффектом и трансlucentных модификаторов системы керамики VINTAGE MP обеспечивает практически неограниченные возможности в придании индивидуальных характеристик.



Мостовидный протез для 11-13

Uni-Layer с индивидуальными характеристиками с применением трансlucentных масс с опаловым эффектом VINTAGE MP



Мостовидный протез для 21-23

Uni-Layer с нанесенными красками для керамики VINTAGE Art

Компоненты системы



VINTAGE MP Uni-Layer, набор (A2/A3)

Кат. номер 9633

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 50 гр

Кат. номер 9627

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 200 гр

Кат. номер 9628

VINTAGE MP Uni-Layer LT, 50 гр

Кат. номер 9630



ООО "Алкор Дент"
125310, Россия,
Москва, Пятницкое шоссе, дом 36 корп. 1
Тел. +7 499 550 34 00, +7 905 701 66 62, +7 499 714 70 30
korchagin-dental@mail.ru
www.alkordent.ru



Алкор Дент